


# TCS-バックアップ (予備サクション)

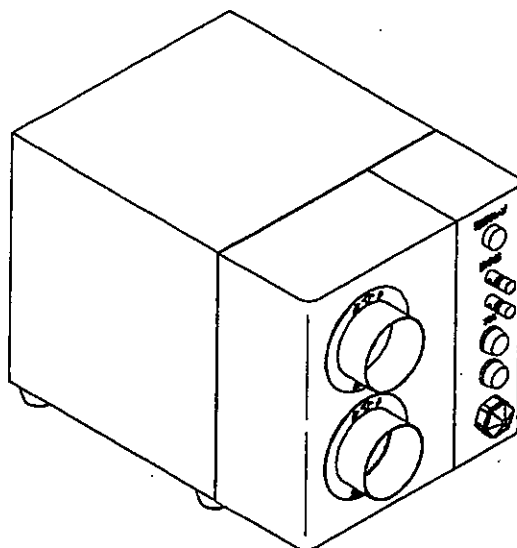

## 取扱説明書

医療用具承認番号  
21600BZZ00489000号

安全にお使いいただくために必ずお読み下さい。



このたびは『TCS-バックアップ』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この取扱説明書の  警告・  注意をよくお読みいただき正しくご使用下さい。
- この取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、わからない時は再読して下さい。

正しく使って効率アップ



株式  
会社

東京技研




## 概要

本機は、セントラルサクション・ブロワが故障時の予備の吸引装置です。  
 メインモータ故障時に、メインモータ又は操作盤の切換えスイッチを通常から予備に切替えることにより、メインモータ故障中に診療を止めることなく吸引することが可能です。

## 各部名称

全体図

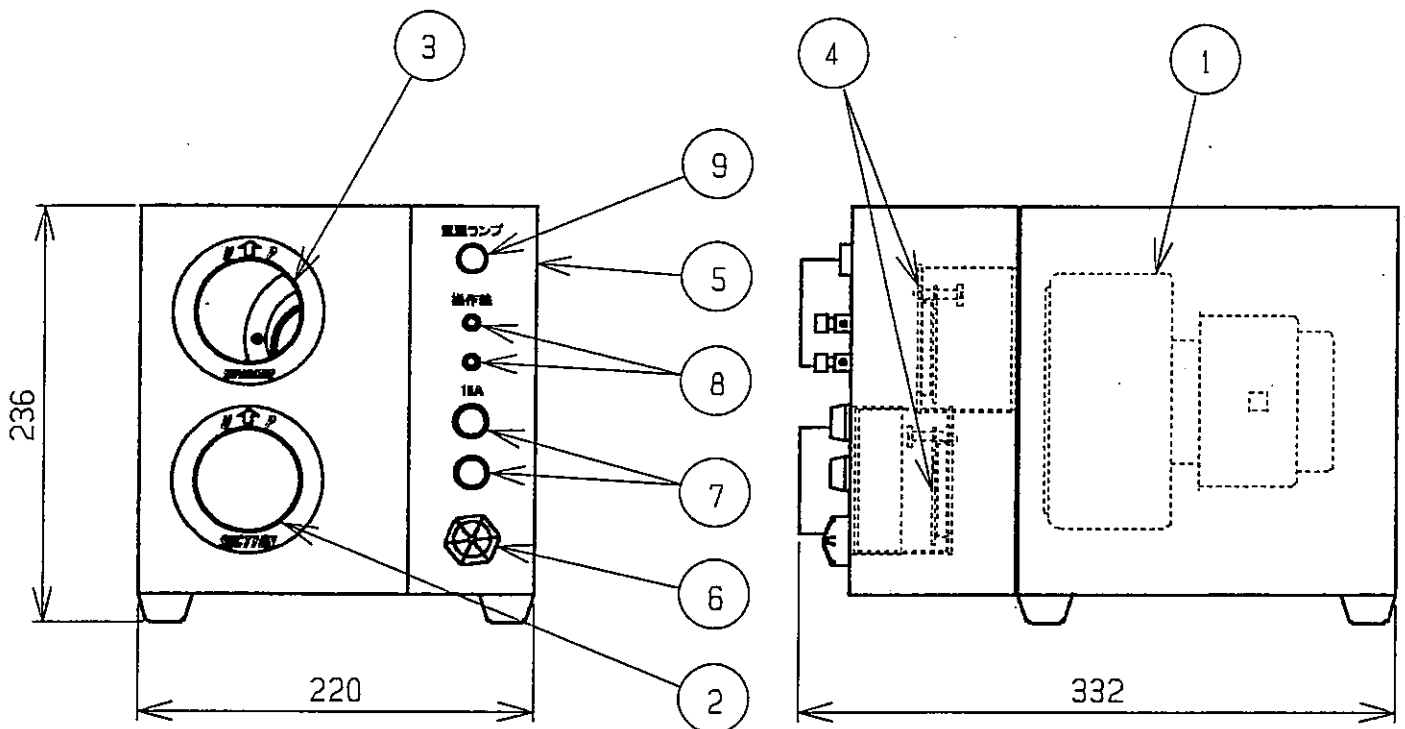

番号	名称	備考
1	ブロワモータ	
2	吸引口	メインブロワ側
3	吸引口	分離器側
4	逆止弁部	
5	電装部	
6	電源コード	
7	ヒューズホルダ	15A
8	操作線コネクタ	
9	電源ランプ	

本機は、歯科用セントラル・サクシオン・ブロワが故障時の予備サクシオンです。

## 注意事項



### 注意

- エアータービンの注水、口腔内の唾液、血液以外は吸引させない。
- 水、有機溶剤、火気類は絶対に吸引させない。
- 点検・清掃の際には、必ず電源を切ってから行う。

☆下記の原因により生じた故障・損傷につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承下さい。

- ① 当社または当社の指定した業者以外による改造・保守および修理
- ② 当社が納入した製品以外の他社製品が原因で、当社の製品が受けた故障・損傷
- ③ 当社指定の純正部品以外の補修部品の使用による改造・保守・修理
- ④ この取扱説明書に記載されている注意事項や操作方法を守らなかった場合
- ⑤ この取扱説明書に記載されている電源・設置環境など、本装置の使用条件を逸脱した周囲条件による場合
- ⑥ 火災・天災(地震・水害・落雷等)の場合



### 警告

- ドライバーおよび工具等を使用する「分解」は絶対にしない。

## 使用時の注意



### 注意

#### (1) 使用前の確認

- 電装プラグが専用の電源コンセントにしっかり差し込まれている。
- 電源プラグに異常な発熱がない。
- 電源コードに亀裂や擦傷がない。

#### (2) 使用上の注意

- 電源コンセントは100V・10A以上のアース付き専用コンセントを直接使用し、たこ足配線は絶対にしない。
- 感電防止のため濡れた手及びコードを持つてのプラグの抜き差しは絶対に行わない。
- 定格不足の延長電源コードは使用しない。

☆異常な発熱・発煙・漏電など思わぬ事故の原因となりますので、やむを得ず延長する場合は、定格100V・15Aアース付き電源コードを使用してください。

## 仕様

電源	単相100V
電流	10A
出力	0.75kw
周波数	50/60Hz
寸法 W×D×H	220×331.2×236mm
重量	約9kg

## アフターサービス お問い合わせは購入先または当社まで

- 保証書は記載内容をご確認のうえ、大切に保管して下さい。
- 保証期間は1年間です。
- 保証期間中の修理(保証書の記載内容により無料修理)
- 保証期間経過後の修理は、購入先または当社までご相談下さい。

歯科用セントラル・サクシオン・システムの専門メーカー



株式  
会社

**東京技研**



E-mail: TG@tokyogiken.com Home Page: <http://www.tokyogiken.com>

本 社 〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13  
TEL (03)-3703-5581 (代) FAX (03)-3705-1760

仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-28-2  
TEL (022)-371-9651 (代) FAX (022)-371-9653

名古屋営業所 〒465-0005 名古屋市名東区香流1-822  
TEL (052)-776-3355 (代) FAX (052)-776-3356

大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-8-1  
TEL (06)-6368-8877 (代) FAX (06)-6368-8876

福岡営業所 〒812-0042 福岡市博多区豊1-8-21  
TEL (092)-411-0377 (代) FAX (092)-411-0376

仕様は予告なく変更する場合がございます。