

セントラルバキューム用

# クリーナー&リンス

VACUUM CLEANER & VACUUM RINSE



## 1日1回のクリーナー&リンスで、 いつも爽やかな診療空間。

セントラルバキュームは、見えないところにたくさんの汚れが隠れています。

放っておくと、たまった汚れが詰りを起こして吸引力が低下したり、

悪臭が発生したり、さまざまなトラブルの原因になります。

それらを防ぐために生まれたのがセントラルバキューム専用“クリーナー&リンス”。

確かな洗浄効果がパイプやジョイント部分など隅々まできれいにして、

快適な診療環境をつくれます。



# C&R

セントラルバキューム用  
クリーナー&リンス

## 簡単なクリーニングで汚れを隅々までスッキリ落とし、 衛生的で心地よい診療環境をつくります。

各ユニットのバキュームチップからC&Rを吸引するだけの簡単クリーニング。  
1日1回のC&Rで、毎日安心してセントラルバキュームをお使いいただけます。

### C&Rの特長

- 抜群の洗浄力が配管内やジョイント部、分離器の汚れをきれいに洗い流します。
- アワが出ないバキューム専用クリーナーなので、吸引するだけで簡単・手軽に洗浄が行なえます。
- リンスがクリーナーの薬剤成分を中和しながら、フローラルの香りで診療室を爽やかにつつみます。

### ご使用方法

CLEANER



- 1** C&Rを10倍に薄めます。  
ユニット1台あたり約30mlのクリーナーとリンスを、それぞれ10倍に薄めてください。



- 2** クリーナー液を吸引します。  
ユニットフィルターの金網を洗浄後、機械室から一番離れたユニットから順番に、①で用意したクリーナー液を吸引してください。



- 3** 5分間放置します。  
配管内に付着した汚れを、クリーナーがしっかりと取り除きます。

RINSE



- 4** リンス液を吸引します。  
①で用意したリンス液を、クリーナー液と同じ手順で吸引してください。




- 5** 2分間、空運転します。  
すべてのユニットを2分間、空運転し、空気を吸引させます。



- 6** 吸引口を水洗します。  
ご使用されたバキュームチップを水洗後、念のため処理してください。

- ◎ C&Rは必ず、クリーナーとリンスのペアでお使いください。
- ◎ 他のクリーナーとの併用はさけてください。

### C&Rの吸引経路

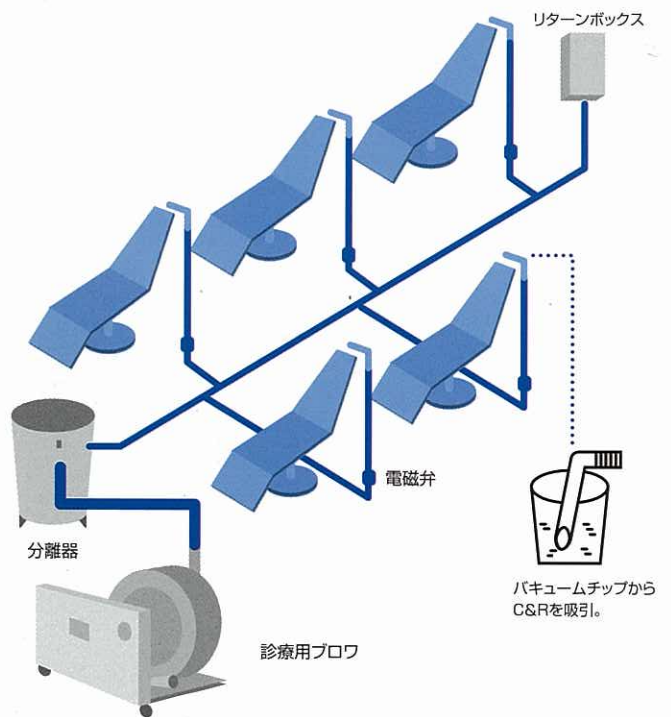

### バキュームクリーナーによる洗浄力テスト



長い間の使用で汚れがしっかりこびりついたパイプを、10倍に薄めたクリーナー液に浸しただけで、こんなに汚れが落ちました。

お問い合わせは



歯科用セントラル・バキューム・システムの専門メーカー

株式会社 **東京技研**

本社 〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13  
TEL (03)3703-5581(代) FAX (03)3705-1760

仙台営業所 TEL (022) 371-9651 (代) FAX (022) 371-9653  
名古屋営業所 TEL (052) 776-3355 (代) FAX (052) 776-3356  
大阪営業所 TEL (06) 6368-8877 (代) FAX (06) 6368-8876  
福岡営業所 TEL (092) 612-1191 (代) FAX (092) 612-1193